

REF C-1082/TT

EN ADENOVIRUS POSITIVE CONTROL
FR CONTRÔLE POSITIF ADENOVIRUS
IT CONTROLLO POSITIVO ADENOVIRUS
PT CONTROLO POSITIVO ADENOVÍRUS

*** NOT TO BE USED WITH GASTROVIR –STRIP and WITH 40/41 ADENO-STRIP ***

Can be used with : Adeno-Strip, Combi-Strip and Adeno Respi-Strip
Peut être utilisé avec : Adeno-Strip, Combi-Strip and Adeno Respi-Strip
Può essere utilizzato con: Adeno-Strip, Combi-Strip and Adeno Respi-Strip
Pode ser utilizado com : Adeno-Strip, Combi-Strip and Adeno Respi-Strip

Packaging : Freeze-dried form
Présentation : *Produit lyophilisé*
Confezione: : Prodotto liofilo
Apresentação : *Produto liofilizado*

Inactivation : This product consists of Adenovirus produced in culture, UV inactivation
Inactivation : *Ce produit est constitué de Adenovirus produit en culture, inactivé par UV*
Inattivazione : Questo prodotto consiste di Adenovirus prodotto in coltura, UV inattivazione
Inactivação : *Este produto consiste em Adenovírus produzido em cultura, inactivado por UV*

Protocol for use : To be rehydrated with 2 ml of distilled water. Should be used diluted with the dilution buffer up to 1/4 for the Adeno-Strip and Combi-Strip and 1/120 for the Adeno Respi-Strip for getting a positive reaction.
Protocole d'utilisation : *Réhydrater avec 2 mL d'eau distillée. Doit être utilisé à une dilution finale de ¼ avec le tampon de dilution pour l'Adeno-Strip et le Combi-Strip et 1/120 pour l'Adeno Respi-Strip pour obtenir une réaction positive.*
Protocollo di utilizzo : Reidratato con 2 ml di acqua distillata. Dovrebbe essere diluito con tampone di diluizione fino a 1/4 per Adeno-Strip e Combi-Strip et a 1/120 per Adeno Respi-Strip per ottenere una reazione positiva.
Protocolo de utilização : *Rehidratar com 2ml de água destilada. Deve ser utilizado diluído com o tampão de diluição, numa diluição até ¼ para Adeno-Strip e Combi-Strip, e numa diluição até 120 para Adeno Respi-Strip, de modo a obter uma reacção positiva.*

Storage : Several years at 4 °C in the freeze-dried form (see labelled expiration date).

Once rehydrated : no more than 2 weeks at 4 °C
Could be aliquoted and frozen at - 20 °C for 12 months.

Stockage : *Plusieurs années à 4°C sous forme déshydratée (se référer à la date de péremption sur l'étiquette)*
2 semaines à 4°C une fois réhydraté
Peut être aliquoté et congelé pour 12 mois.

Conservazione : Alcuni anni a 4°C (vedere data di scadenza)
Una volta reidratato: non più di 2 settimane a 4 °C
Potrebbe essere aliquotato e congelato a - 20 °C per 12 months.

Conservação : *Vários anos a 4°C se liofilizado (ver de prazo de validade)*
Uma vez reidratado: manter no máximo 2 semanas a 4°C
Pode-se aliquotar e congelar a -20°C durante 12 meses

Precaution : Handle with care. Contains Thimerosal

Précaution : *Manipuler avec soin. Contient du Thimerosal*

Precauzioni : Maneggiare con cura. Contiene Thimerosal come conservante

Precaução : *Manusear com cuidado. Contém Thimerosal como conservante*
