

REF C-1085/TT

EN CRYPTOSPORIDIUM POSITIVE CONTROL
FR CONTRÔLE POSITIF CRYPTOSPORIDIUM
IT CONTROLLO POSITIVO CRYPTOSPORIDIUM
PT CONTROLO POSITIVO CRYPOSPORIDIUM

Can be used with : **Crypto-Strip**
Peut être utilisé avec : **Crypto-Strip,**
Può essere utilizzato con: **Crypto-Strip**
Pode ser utilizado com : **Crypto-Strip**

Packaging : Freeze-dried form
Présentation : *Produit lyophilisé*
Confezione: : Prodotto liofilo
Apresentação : *Produto liofilizado*

Inactivation : This product consists of cryptosporidium oocysts, UV inactivation
Inactivation : *Ce produit est constitué d'oocystes de cryptosporidium, inactivé par UV*
Inattivazione : Questo prodotto consiste di oocisti di cryptosporidium, UV inattivazione
Inactivação : *Este produto consiste em oocistos de cryptosporidium , inactivados por UV*

Protocol for use : To be rehydrated with 2 ml of distilled water. Should be used diluted with the dilution buffer up to 1/4 for getting a positive reaction.
Protocole d'utilisation : *Réhydrater avec 2 mL d'eau distillée. Doit être utilisé à une dilution finale de ¼ avec le tampon de dilution pour obtenir une réaction positive.*
Protocollo di utilizzo : Reidratato con 2 ml di acqua distillata. Dovrebbe essere diluito con tampone di diluizione fino a 1/4 per ottenere una reazione positiva.
Protocolo de utilização : *Rehidratar com 2ml de água destilada. Deve ser utilizado diluído com o tampão de diluição, numa diluição até 4 , de modo a obter uma reacção positiva*

Storage : Several years at 4 °C in the freeze-dried form (see labelled expiration date).
Once rehydrated : no more than 2 weeks at 4 °C
Could be aliquoted and frozen at - 20 °C for 12 months.
Stockage : *Plusieurs années à 4°C sous forme déshydratée (s e référer à la date de péremption sur l'étiquette)*
2 semaines à 4°C une fois réhydraté
Peut être aliquoté et congelé pour 12 mois.
Conservazione : Alcuni anni a 4°C (vedere data di scadenza)

Una volta reidratato: non più di 2 settimane a 4 °C
Potrebbe essere aliquotato e congelato a - 20 °C per 12 months.

Conservação : *Vários anos a 4°C se liofilizado (ver prazo de validade)*
Uma vez reidratado: manter no máximo 2 semanas a 4°C
Pode-se aliquotar e congelar a -20°C durante 12 meses

Precaution : Handle with care. Contains Thimerosal
Précaution : *Manipuler avec soin. Contient du Thimerosal*
Precauzioni : Maneggiare con cura. Contiene Thimerosal come conservante
Precaução : *Manusear com cuidado. Contém Thimerosal como conservante*
